

- PrimaDerm®pro est **non irritant** pour la peau et les muqueuses, **non allergisant**. Il est **bio-compatible**.
- PrimaDerm®pro est un dispositif médical qui ne contient **pas de principe actif** au sens pharmacologique du terme.
- PrimaDerm®pro est utilisable sur tous types de peaux pour le corps et le visage, y compris les paupières.

## ABSENCE D'EFFICACITÉ ?

- **Positionnement du produit sur peau non sèche.**  
Une peau humide est un frein à la pénétration du produit.
- **Positionnement du produit sur peau non propre.**  
Une substance indésirable présente à la surface de la peau peut être entraînée par le produit dans l'épiderme (effet drainant) d'où possible aggravation des troubles.
- **Lavage de peau immédiatement après étalement du produit.**  
Le polymère n'a pas eu le temps de se positionner.
- **Positionnement du produit insuffisant.**  
Application une seule fois par jour, irrégulièrement ou sur une trop courte durée (2 ou 3 jours); interruptions dans le traitement ou abandon.
- **Déception sur la sensation hydratante du produit.**  
Voulant favoriser dans le temps l'équilibre naturel de régénération de la peau, PrimaDerm®pro n'apporte pas de gras.
- **Malgré tout**, il se peut que dans **quelques cas** PrimaDerm®pro ne donne **aucun résultat...**

INGREDIENTS: Aqua, Mhevozyx®, Butane (and) Propane, Dimethicone, Polysorbate 20, TEA (Sans parfum et sans conservateur)

PrimaDerm®pro 60 ml réf.: 3 760066 490036

[www.primaderm.fr](http://www.primaderm.fr)



Tout spray entamé peut être utilisé sans risque jusqu'à la date de péremption



Métanoïa santé - 2 rue Léon Patoux - 51100 REIMS

Tél: 09 72 63 09 05 - [www.primaderm.fr](http://www.primaderm.fr)

200327

# PrimaDerm®

## pro macération et irritation soin et protection



DERMITES  
PROFESSIONNELLES

EN

MILIEU HOSPITALIER

PROTECTION CONTRE LES  
AGRESSIONS CUTANÉES



(Étude en milieu industriel de 1995 à 2004 de l'efficacité protectrice sur peau saine et sur peau fragilisée du produit de protection PrimaDerm®. Dr JC Collinot- AISMT St Dizier. Dossier Scientifique PrimaDerm®)

## PROPRIETES

- Mhevozyx® est un polymère cristallin intra-épidermique.
- **Non occlusif, non filmogène, non gras**, ne favorise pas le manuportage.\*
- **Résiste à des lavages répétés** (une dizaine consécutifs).
- **Durée d'action**, de **3 à 7 heures** en fonction de l'état de la peau.
- **Compatible** avec les règles d'hygiène IAA et hospitalières et l'utilisation des **gels hydro-alcooliques**.

\* (Études cliniques et microbiologiques du produit PrimaDerm® au CHU de Nancy. 1998.  
Dr. Lepori, Dr. Coudane, Dr. Simon. Dossier Scientifique PrimaDerm®)

## INDICATIONS

- **Prévention et soin** pour toutes peaux des **allergies** de contact, dermatites d'irritation, d'usure et de **macération** sur épidermes **sains ou altérés**.
- **Renforce la résistance** de l'épiderme aux **agressions** chimiques, physiques et biologiques.
- **Limite la macération** accompagnant le **port des gants, de masques, de lunettes**.
- **Limite et traite** les agressions liées à l'**usage intensif de produits d'hygiène**.
- Utilisable sur **toute la surface corporelle**, y compris les paupières.
- Un usage à **long terme** ne présente **aucun inconvénient**.


## SPÉCIFICITÉ

- PrimaDerm®pro est doux par son aspect, par sa galénique, par son innocuité. Il agit avec le temps et dans le temps, respectant le cycle naturel de la peau.

### PrimaDerm®pro à l'hôpital


- Lors de la prise de poste ou après une pause, **après** lavage et séchage des mains, appliquer PrimaDerm®pro. Une flore profonde est mobilisée à la surface des mains par le frottement lors de l'application de PrimaDerm®pro. Cette flore peut être éliminée par un nouveau lavage très léger ou une application de gel hydro-alcoolique
- **Après le port de gants**, laver soigneusement les mains **avant** toute **nouvelle application** de PrimaDerm®pro.
- L'application de PrimaDerm®pro **ne dispense pas de respecter les pratiques d'hygiène réglementaires**.

## MODE D'ACTION

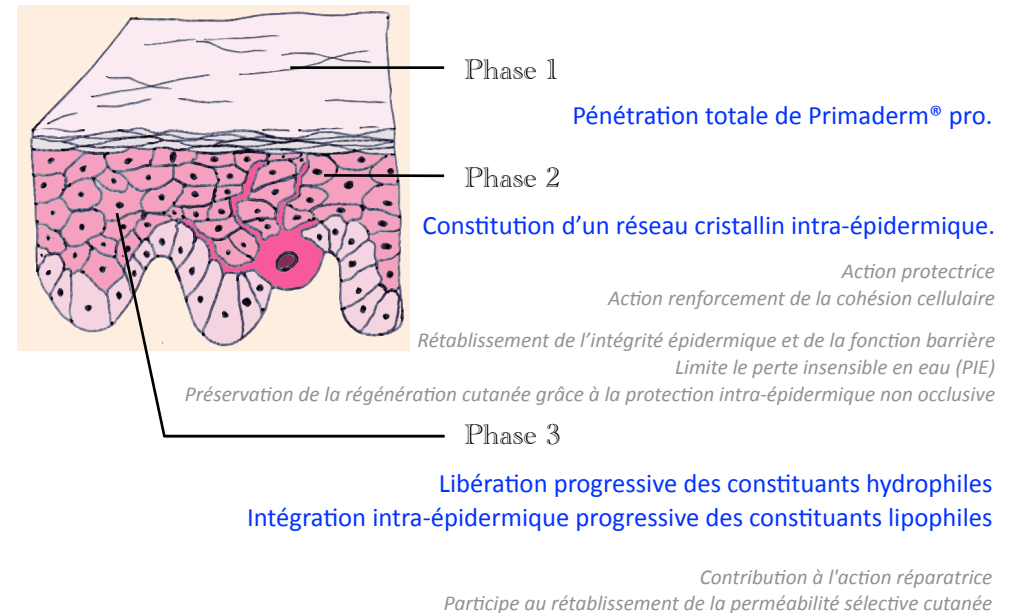

## MODE D'EMPLOI

- **Appliquer sur peau propre et sèche.**
- Tenir le spray tête en bas et extraire une noix de mousse en appuyant légèrement sur le diffuseur.
- Appliquer sur la zone à traiter, faire pénétrer en massant doucement.
- Si la zone est sensible ou abîmée, tapoter avec la boule pour déposer un peu de produit, attendre quelques instants, masser doucement avec le reste du produit.

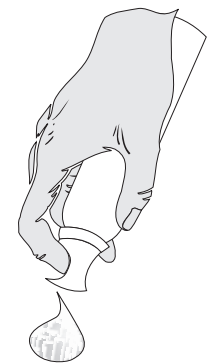

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions sur l'étiquette. Respecter les précautions d'emploi.  
En cas de doute, consultez votre médecin spécialiste.  
Ne remplace pas les dispositifs de protection et d'hygiène obligatoires.